

Bruksanvisning Malem vibrasjonsklokke M010

- Norsk kortversjon

Malem påminningsklokke er laget for å hjelpe barn med å huske å gå på toalettet eller ta medisiner. Dette er et tillegg til bruksanvisningen. Vi anbefaler å lese gjennom bruksanvisningen som følger med produktet.

Hovedfunksjoner:

- Klokkemodus med visning av tid (time, minutt og sekund).
- Stoppeklokke.
- **AL:** Alarmer (inntil 12 stykk).

Generelt: Trykk Mode (M) for å skifte mellom de ulike funksjonene. Trykk Select (S) for å velge ønsket funksjon i innstillingsmodus. Trykk Change (C) for å endre innstilling. For å stoppe alarmer kan hvilken som helst knapp trykkes inn. (B) har ingen funksjon.

Stille inn klokkeslett (TE):

- Trykk (S) og hold til sekunder begynner å blinke.
- Trykk (C) for å stille sekunder til 0.
- Trykk (S) for å stille minutter. Velg minutter ved å trykke (C).
- Trykk (S) for å stille time. Velg time ved å trykke (C).
- Trykk (S) for å stille måned. Velg måned ved å trykke (C).
- Trykk (S) for å stille dag. Velg dag ved å trykke (C).
- Trykk (S) for å stille ukedag. Velg ukedag ved å trykke (C).
- Trykk (S) for å forlate innstillingene.

Stille inn alarm (AL):

- Trykk (M) tre ganger for å komme til tidsalarm-modus (AL).
- Trykk (S) for å velge alarm nummer 1-12. Trykk (S) inntil ønsket nummer kommer opp på skjermen.
- Trykk (S) i 3 sekunder til minutter begynner å blinke.
- Trykk (C) for å stille inn minutter.
- Trykk (S) en gang for å stille inn timer.
- Trykk (C) får å stille ønsket time.
- Trykk (S) for å bekrefte innstillingene.
- Trykk (C) for å velge alarmformat med vibrasjon, eller å fjerne vibrasjon. (Symboler for dette vises på skjermen)

- Trykk (S) for å stille inn en annen alarm.
- Gjenta prosessen dersom du ønsker flere alarmer.
- Trykk (M) for å forlate innstillingene.

Stoppeklokke (WA):

- Trykk (M) en gang for å komme til stoppeklokke-modus.
- Trykk (S) for å begynne tellingen.
- Trykk (S) igjen for å pause tellingen.
- Trykk (C) for å nullstille.
- Trykk (M) for å forlate stoppeklokke-modus.

Se bruksanvisning som følger med klokken for andre funksjoner som «auto-repeat timer» alarmer og bytte av batteri.



Helsestasjonsbutikken.no